



Wax Denture

열가소성 수지인 Wax로 만든 제품으로 손쉽게 조작하여 무치악 환자의 잇몸과 교합 채득에 용이한 제품입니다.



상악



하악

- ✓ 환자가 2번 내원 할 필요가 없습니다.
- ✓ 구강스캐너로 스캔이 가능합니다.
- ✓ Sprint 대비 적은 비용입니다.
- ✓ 가이드 제작 시간을 단축시켜 줍니다.

사용방법



1 뜨거운 물에 10초간 담지



2 환자 구강에 넣어 내면 형상 맞춤



3 Wax Denture 내면에 인상재 주입



4 Wax Denture를 구강에 넣고 내면과 Bite 맞춤




5 Wax Denture의 Buccal면에 Marker 또는 Flow Resin 부착



6 대합치와 Wax Denture의 Bite, 내 외면을 스캔

사양

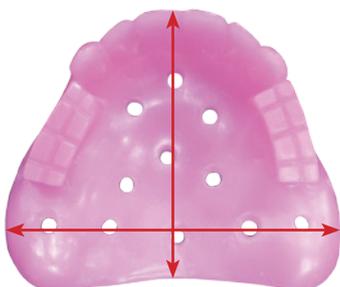

Wax Denture	Size		형명	
	상악	하악	상악	하악
Small	68.5 * 57.9mm	71.6 * 54.8mm	WDU 01	WDL 01
Medium	76.8 * 61.4mm	77.4 * 59.3mm	WDU 02	WDL 02
Large	79.5 * 62.5mm	80.2 * 62mm	WDU 03	WDL 03