


초기 고정력을 안정적으로
UFIII IMPLANT

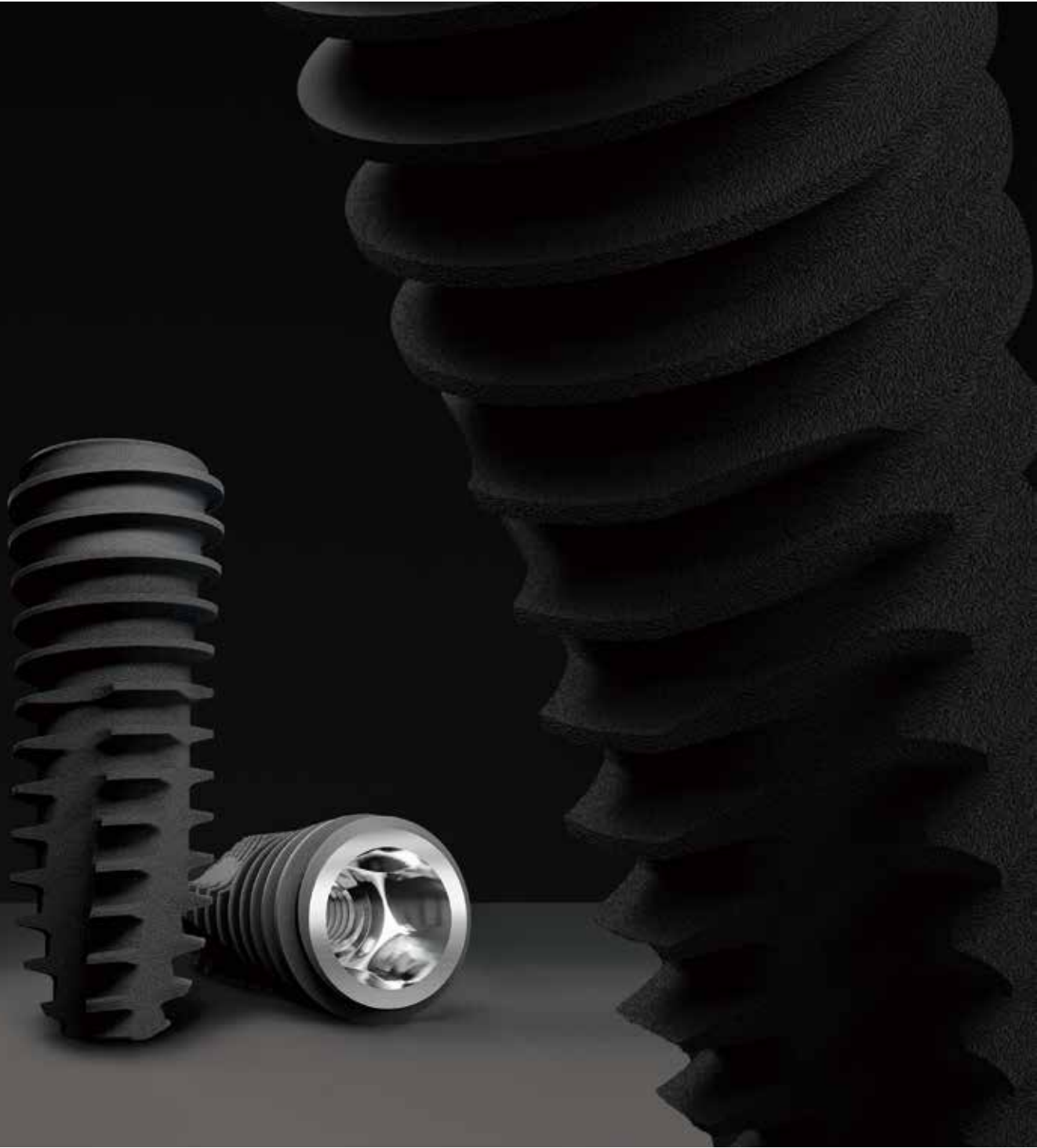

Soft Bone에 특화된 디자인으로 초기고정력을 더욱 안정적으로



Soft Bone에 강력한 디자인

전체적인 Tapered 형상 및 더 커진 Cutting Edge 디자인에 의해
식립감 및 Self-tapping 기능 향상



Drill Protocol 단축

Soft Bone에서 직경에 따라 1~4단계 단축,
Under Drilling시에도 쉽게 Self-tapping가능



UFII & UFIII 콜라보로 모든 적응증 해결


01
Soft Bone

02
Sinus Lift

03
Self-Tapping

Hybrid Type SLA Implant

UFIII Implant Surface HSA

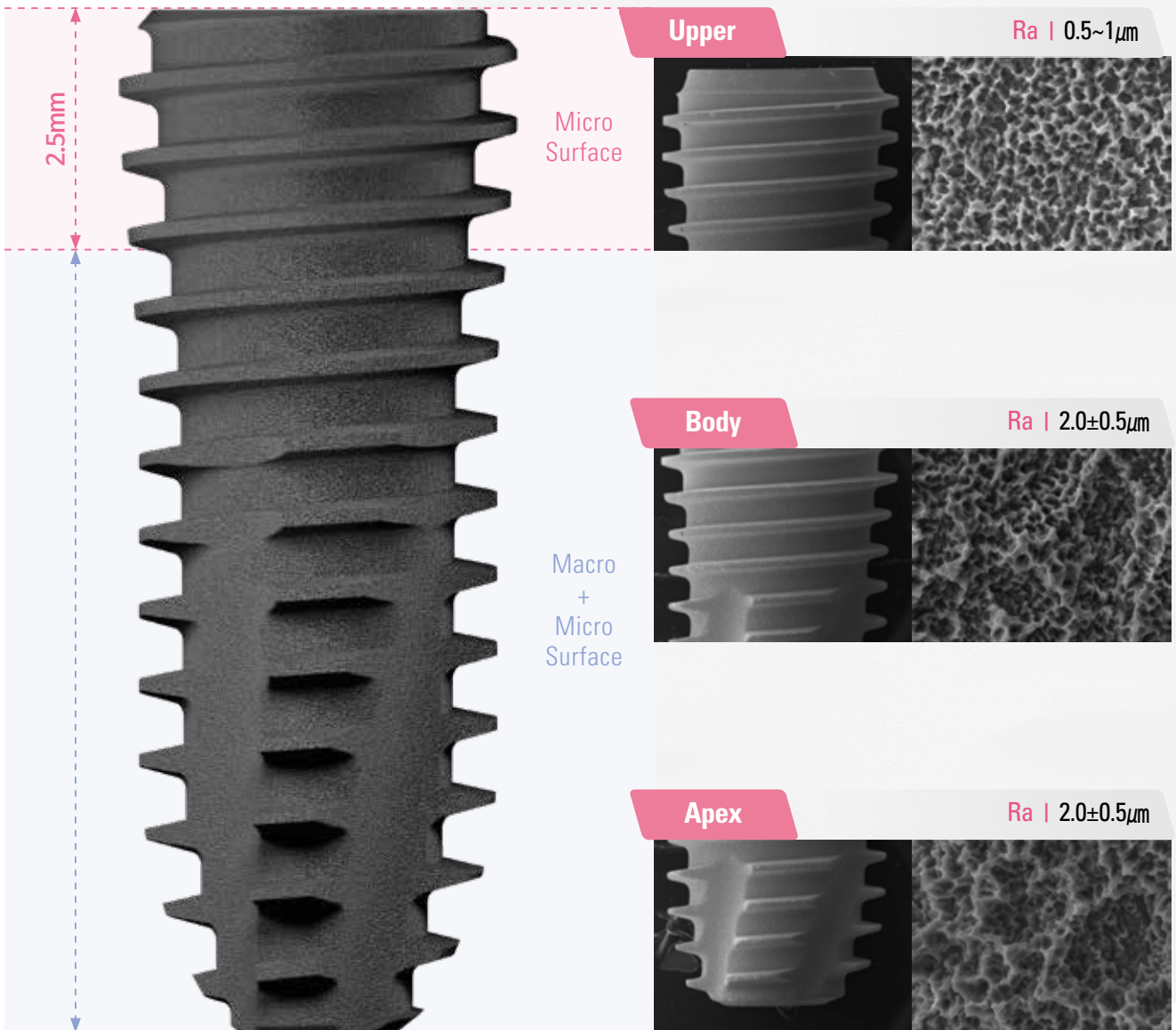


당사제품비교 | 임상케이스

Protocol 비교

Flap Surgery

3단계 단축

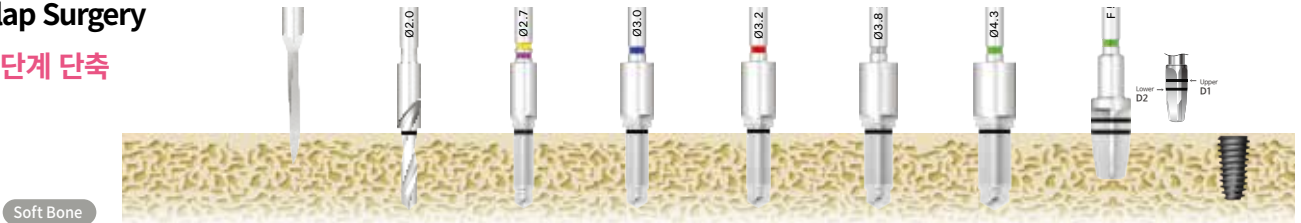


Bone Density	Fixture	Drill								Ø5.0 X 10mm
		Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile	
D4	UF II	●	●	●	●	●	●			
	UF III	●	●	●						

3단계 단축

Flapless Surgery

4단계 단축

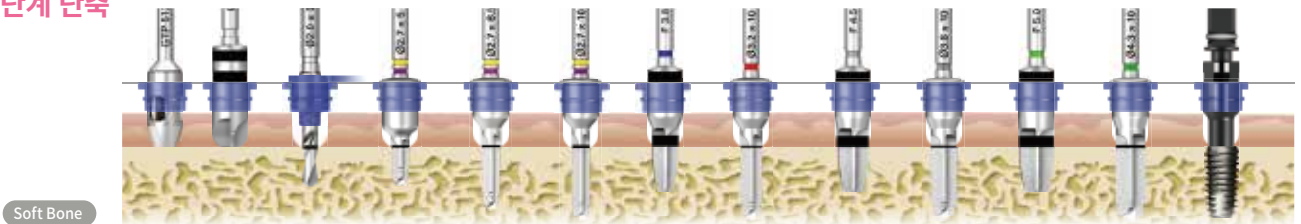

Bone Density	Fixture	Drill										Ø5.0 X 10mm
		Ø2.0 X 5mm	Ø2.7 X 5mm	Ø2.7 X 8.5mm	Ø2.7 X 10mm	F3.8 Profile	Ø3.2 X 10mm	F4.5 Profile	Ø3.8 X 10mm	F5.0 Profile	Ø4.3 X 10mm	
D4	UF II	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	UF III	●	●	●	●							


4단계 단축

임상 케이스

01 상악 Soft Bone Case



02 상악 Soft Bone Case

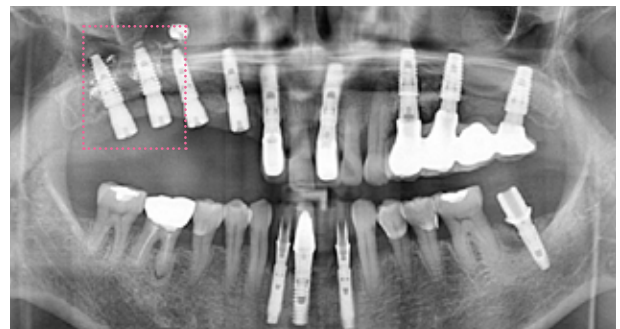

Fixture Design 비교

Extra Diameter

상악동 Case에서도 안정적인 고정력을 획득합니다.

Fully Taper Body


전체 Taper type으로 인접치 간섭을 피하고 안정적인 식립이 가능합니다.

Wide Thread Pitch

큰 Thread로 Soft Bone에서 초기고정력을 증진시켜줍니다


Power of Cutting Edge

길고 날카로워진 Edge 형상으로 Under Drilling에서도 쉽게 Self-tapping이 이루어집니다

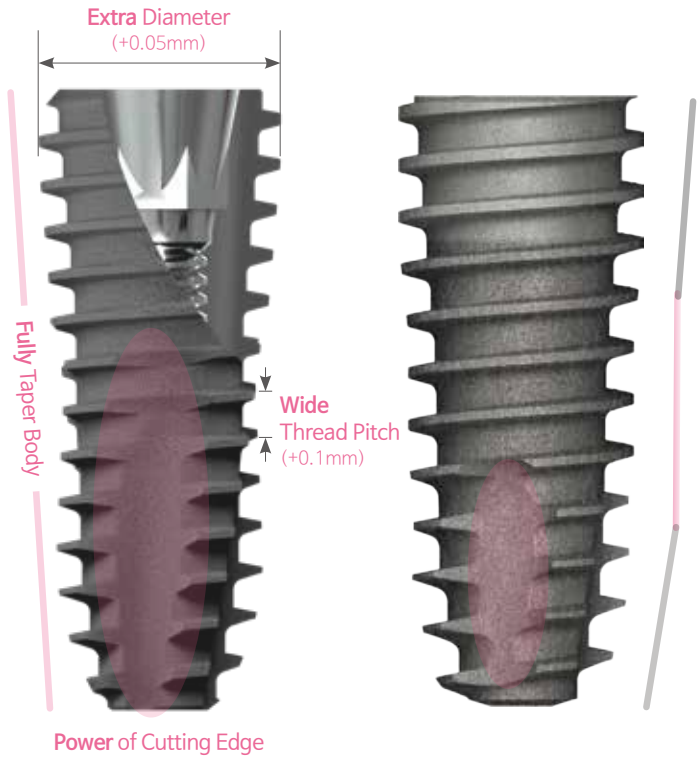


Selection guide		UF III	UF II
골질	D1	△	○
	D2	○	○
	D3	○	△
	D4	○	△
시술 위치	상악전치부	○	○
	상악구치부	○	△
	하악전치부	X	○
	하악구치부	△	○
발치 후 즉시 식립		○	△

03 하악 발치 즉시 식립 Case

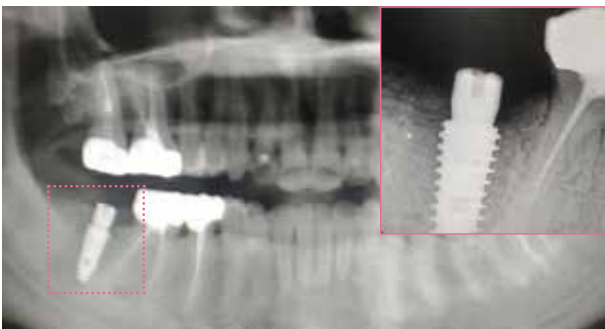


04 상악 무치악 Case

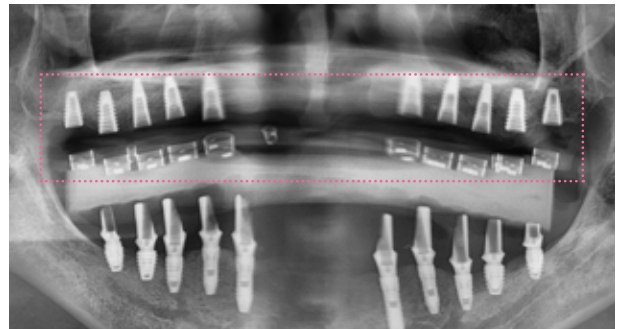

주문코드 | 권장 프로토콜




UFIII Regular Fixture

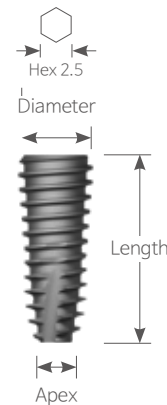- HSA / Packing Unit : Fixture | Order code : UFIII 0000SF (ex : UFIII 3808SF)
 Fixture + Cover Screw | Order code : UFIII 0000S (ex : UFIII 3808S)
- UV Active / Packing Unit : Fixture | Order code : UFIII 0000UV3 (ex : UFIII 3808UV3)








Unit mm | Scale 1 : 1.2






R D Ø3.8 Hex 2.5 Apex Ø1.4

Length	7	8.5	10	11.5	13
					
HSA	-	UFIII 3808SF	UFIII 3810SF	UFIII 3811SF	UFIII 3813SF
UV Active	-	UFIII 3808UV3	UFIII 3810UV3	UFIII 3811UV3	UFIII 3813UV3

R D Ø4.0 Hex 2.5 Apex Ø1.6






Length	7	8.5	10	11.5	13
					
HSA	UFIII 4007SF	UFIII 4008SF	UFIII 4010SF	UFIII 4011SF	UFIII 4013SF
UV Active	UFIII 4007UV3	UFIII 4008UV3	UFIII 4010UV3	UFIII 4011UV3	UFIII 4013UV3

R D Ø4.5 Hex 2.5 Apex Ø1.6


Length	7	8.5	10	11.5	13
					
HSA	UFIII 4507SF	UFIII 4508SF	UFIII 4510SF	UFIII 4511SF	UFIII 4513SF
UV Active	UFIII 4507UV3	UFIII 4508UV3	UFIII 4510UV3	UFIII 4511UV3	UFIII 4513UV3

R D Ø5.0 Hex 2.5 Apex Ø2.0

Unit mm | Scale 1 : 1.2


Length	7	8.5	10	11.5	13
					
HSA	UFIII 5007SF	UFIII 5008SF	UFIII 5010SF	UFIII 5011SF	UFIII 5013SF
UV Active	UFIII 5007UV3	UFIII 5008UV3	UFIII 5010UV3	UFIII 5011UV3	UFIII 5013UV3

Ø3.8 UFIII Fixture

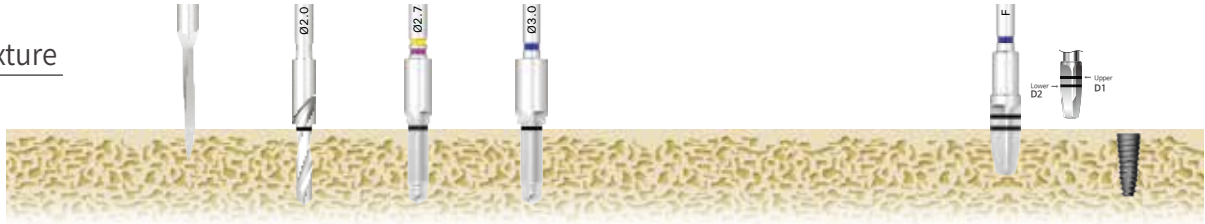


Bone Density	Drill								Profile	Ø3.8 UFIII Fixture
	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile		
D1	●	●	●	●				●		
D2	●	●	●	●				●		
Soft Bone D3	●	●	●							
Soft Bone D4	●	●								

Ø4.0 UFIII Fixture

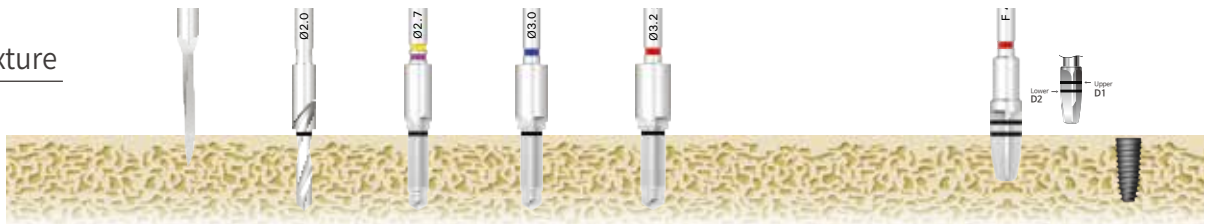


Bone Density	Drill								Profile	Ø4.0 UFIII Fixture
	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile		
D1	●	●	●	●	●			●		
D2	●	●	●	●	●			●		
Soft Bone D3	●	●	●							
Soft Bone D4	●	●								

Ø4.5 UFIII Fixture

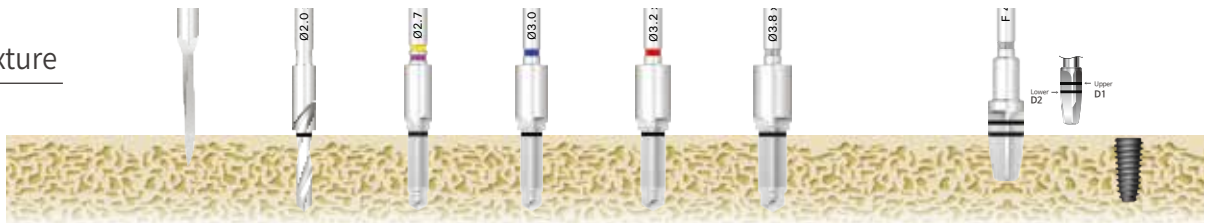

Bone Density	Drill								Profile	Ø4.5 UFIII Fixture
	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile		
D1	●	●	●	●	●	●		●		
D2	●	●	●	●	●	●		●		
Soft Bone D3	●	●	●	●	●					
Soft Bone D4	●	●	●							

Ø5.0 UFIII Fixture

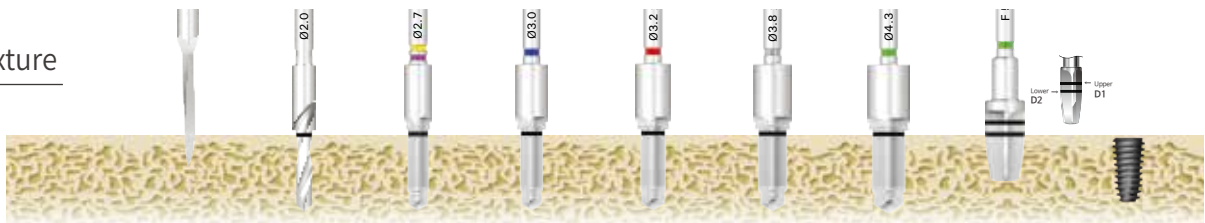

Bone Density	Drill								Profile	Ø5.0 UFIII Fixture
	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile		
D1	●	●	●	●	●	●	●	●		
D2	●	●	●	●	●	●	●	●		
Soft Bone D3	●	●	●	●	●					
Soft Bone D4	●	●	●							



디오임플란트 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 66 | 대표번호 051-745-7777 | www.dio.co.kr

강남·강서지점 02-2268-2850	인천지점 032-515-2878	대구지점 053-321-2806
강북·일산지점 02-2274-2850	경기지점 031-244-2885	울산지점 052-256-2177
대전·충청지점 042-255-2804	강원지점 033-765-2809	경남지점 055-267-5229
광주·제주지점 062-384-2822	전주지점 063-244-9654	부산지점 051-745-7810